


Test de dépistage salivaire Cannabis

Présentation du test

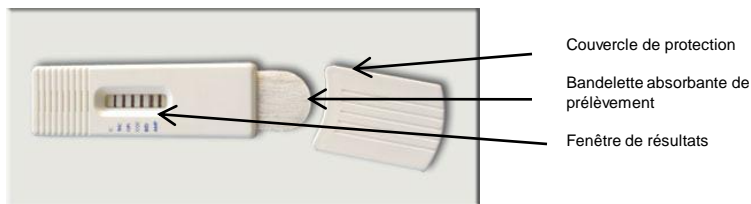

CARACTERISTIQUES

Seuil de détection : 12 ng/mL // Durée minimale de détection : 10 minutes // Durée maximale de détection : jusqu'à 72 heures

CADRE D'UTILISATION

Le kit de dépistage « Cannabis » est un test d'immunochromatographie destiné à la détection rapide et qualitative du cannabis dans un échantillon de salive.

Le test « Cannabis » fournit seulement un résultat analytique préliminaire. Une recherche plus avancée par l'utilisation d'une chromatographie phase gazeuse ou d'une spectrométrie de masse devra être mise en œuvre par la suite pour confirmer les résultats de façon précise et quantitative. A ce stade, un jugement d'expert et des considérations médicales sont indispensables pour interpréter les résultats, notamment lorsque le résultat préliminaire fourni par le test est positif.

EXPLICATION DU TEST

Sur le boîtier de test figurent les lettres T et C pour respectivement "ligne de Test" et "ligne de Contrôle". Aucune des "ligne de Test" et "ligne de Contrôle" n'est visible dans la zone de résultats tant qu'aucun échantillon n'a été utilisé. La "ligne de Contrôle" sert à indiquer le bon fonctionnement du test. Cette ligne de contrôle doit toujours apparaître si la procédure de test a été correctement suivie et si les agents réactifs fonctionnent parfaitement.

CONTENU

Le kit de dépistage contient tous les éléments nécessaires au test :

1. test boîtier.
2. feuillet d'instructions.

ACCESSOIRES NECESSAIRES MAIS NON FOURNIS

1. une montre ou un chronomètre.

PRECAUTIONS

1. Test pour diagnostic in-vitro.
2. Le kit doit être conservé dans son emballage d'origine scellé jusqu'à son utilisation.
3. Ne pas utiliser le kit s'il est endommagé.
4. Ne pas utiliser le kit après sa date de péremption.

STOCKAGE ET STABILITE

Le kit doit être conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre 4 et 30 C°.

AVERTISSEMENT

Le kit de dépistage est un test qualitatif. Ce test ne permet pas de déterminer la quantité de drogue et de métabolites présente dans les urines. Le test permet de distinguer les échantillons positifs et les échantillons négatifs. Un résultat positif signifie que l'échantillon contient le stupéfiant en quantités supérieures au seuil de détection du test.

PROCEDURE DE TEST

1. S'assurer que la personne à tester n'a rien consommé dans les 15 minutes précédents le test (boisson, nourriture, gomme à mâcher, tabac),
2. Retirer le couvercle de plastique afin de découvrir la bandelette absorbante de prélèvement,
3. Laisser la bandelette absorbante en bouche jusqu'à saturation,
4. Dès apparition d'une couleur rose dans la fenêtre de résultats (3 à 5 minutes), sortir la bandelette de la bouche,
5. Remettre le couvercle de plastique en place et attendre 7 minutes,
6. Lire les résultats après 7 minutes.

INTERPRETATION DES RESULTATS

Sur le boîtier, la ligne (T) correspond au cannabis.

La lettre (C) figurant sur le boîtier du test correspond à la bande témoin. Une ligne rose doit apparaître sur la bande témoin (C), cette présence confirme que le test fonctionne correctement.

INVALIDE :

Si aucune ligne n'apparaît au niveau de la lettre (C), le test n'a pas fonctionné correctement et il est nécessaire d'en utiliser un nouveau. Le résultat n'est pas valable quelles que soient les lignes colorées qui apparaissent ou non sur la ligne (T) de la zone de résultats.

NEGATIF : Le cannabis n'est pas présent dans l'échantillon.

Une seconde ligne rose, peu importe qu'elle soit pâle ou non, doit apparaître en face de la lettre (T), cela correspond à un résultat négatif pour le cannabis.

POSITIF : Le cannabis est présent dans l'échantillon.

Si aucune ligne n'apparaît en face de la lettre (T) alors la personne testée est diagnostiquée positive à la consommation de cannabis.

