

Test de dépistage Urinaire multidrogues



CADRE D'UTILISATION

Le kit de dépistage « multidrogues » est un test d'immunochromatographie destiné à la détection rapide, qualitative et simultanée de plusieurs substances stupéfiantes dans un échantillon d'urine.

Le test « multidrogues » fournit seulement un résultat analytique préliminaire. Une recherche plus avancée par l'utilisation d'une chromatographie phase gazeuse ou d'une spectrométrie de masse devra être mise en œuvre par la suite pour confirmer les résultats de façon précise et quantitative. A ce stade, un jugement d'expert et des considérations médicales sont indispensables pour interpréter les résultats, notamment lorsque le résultat préliminaire fourni par le test est positif.

EXPLICATION DU TEST

Sur le boîtier de test figurent les lettres T et C pour respectivement "ligne de Test" et "ligne de Contrôle". Aucune des "ligne de Test" et "ligne de Contrôle" n'est visible dans la zone de résultats tant qu'aucun échantillon n'a été utilisé. La "ligne de Contrôle" sert à indiquer le bon fonctionnement du test. Cette ligne de contrôle doit toujours apparaître si la procédure de test a été correctement suivie et si les agents réactifs fonctionnent parfaitement.

CONTENU

Le kit de dépistage contient tous les éléments nécessaires au test :

1. test bandelettes en boîtier.
2. feuillet d'instructions.

ACCESSOIRES NECESSAIRES MAIS NON FOURNIS

1. un récipient (de type gobelet) pour collecter l'échantillon.
2. une montre ou un chronomètre.

Drogue	Abréviation	Seuil de détection urinaire	Durée minimale de détection	Durée maximale de détection
Amphétamines	AMP	1000 ng/mL	2 à 7 heures	2 à 5 jours
Barbituriques	BAR	300 ng/mL	2 à 4 heures	3 à 8 jours, jusqu'à 3 semaines
Benzodiazépines	BZO	300 ng/mL	2 à 7 heures	2 à 14 jours, jusqu'à 6 semaines
Cocaïne	COC	300 ng/mL	1 à 4 heures	2 à 5 jours
Ecstasy	MDMA	500 ng/mL	1 heure	2 à 3 jours
Métamphétamines	MET, M-AMP	500 ng/mL	1 à 3 heures	2 à 4 jours
Morphine	MOP	500 ng/mL	2 heures	2 à 5 jours
Méthadone	MTD	500 ng/mL	2 heures	2 à 6 jours
Opiacés, Héroïne	OPI	2000 ng/mL	2 heures	2 à 4 jours
Phencyclidine	PCP	25 ng/mL	5 à 7 heures	3 à 8 jours, jusqu'à 1 mois
Cannabis, Marijuana	THC	50 ng/mL	6 à 18 heures	2 à 14 jours (occasionnel) > 30 jours (régulier)

ToxicoTest – Tests de dépistage / www.toxicotest.com

Dernière révision : mars 2009

Comment utiliser ce test ?

1. Retirer délicatement le test de son emballage (n'ouvrir l'emballage de protection qu'au moment d'utiliser le test).
2. Se procurer dans un gobelet propre, un échantillon d'urine à tester.
3. Retirer le capuchon de protection sur le bas du test de façon à découvrir les bandes de test absorbantes. Ne pas toucher les bandes de test et ne pas jeter le capuchon de protection.
4. Plonger délicatement les bandes de test dans l'échantillon d'urine, s'assurer que la partie plastique du test ne soit pas en contact avec l'urine. Laisser les bandes de test en contact avec l'urine pendant 10 à 15 secondes. Dans ce laps de temps, l'échantillon devrait commencer à imbiber les bandes de test par capillarité.
5. Après 20 secondes, retirer les bandes de test de l'échantillon et remettre le capuchon de protection en place.
6. Poser le test sur une surface plane et propre pendant qu'il se développe.
7. Un résultat négatif peut être lu dès son apparition mais un résultat positif ne peut être lu qu'au moins 5 minutes après que le test ait été retiré de l'échantillon. D'une façon générale, tous les résultats ne devraient pas être lus après un délai de 1 heure afin de limiter le risque de fausses interprétations.

Résultats

Chaque bande de test correspond à une famille de drogues ce qui signifie que chacune des bandes de test doit être lue individuellement.

Deux lettres figurent sur le boîtier du test à côté des bandes de test, 'C' correspond à la bande de contrôle et 'T' correspond au résultat du test effectué.

Résultat invalide


Une ligne rose doit apparaître sur la bande de contrôle (C) pour chacune des bandes de test, cette présence confirme que le test fonctionne correctement. Si aucune ligne n'apparaît au niveau de la lettre (C), le test n'a pas fonctionné correctement et il est nécessaire d'en utiliser un nouveau.

Résultat négatif

Si une seconde ligne rose, peu importe qu'elle soit pâle ou non, apparaît en face de la lettre (T), cela correspond à un résultat négatif.

Résultat positif

Si aucune ligne n'apparaît en face de la lettre (T) alors la personne testée est diagnostiquée positive à la consommation de la drogue correspondante.

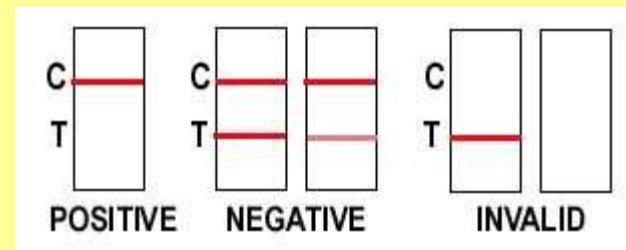

Que faire avec ces résultats ?

Un résultat négatif indique que la personne testée ne présente soit aucune trace, soit une quantité inférieure au seuil de détection du test, de l'une des drogues testées dans le corps au moment du dépistage. Il est possible d'effectuer un nouveau test environ un mois après.

En cas de résultat positif, cela signifie que des traces de drogues ont été détectées dans l'urine. Il est possible d'effectuer un nouveau test ultérieurement pour confirmer le résultat ou d'orienter la personne testée vers un laboratoire d'analyse pour un dépistage plus complet et quantitatif au moyen de méthodes spectrométriques et chromatographiques par exemple.

ATTENTION :

De nombreux médicaments, dont certains peuvent être achetés sans ordonnance, contiennent des dérivés opiacés, c'est-à-dire des substances chimiquement semblables à l'héroïne. C'est le cas de certains sirops contre la toux et de nombreux médicaments contre la douleur dont la consommation peut provoquer un résultat positif à un test de dépistage.

La loi interdit de procéder à un quelconque examen médical à l'insu des personnes, elle interdit également de dépister un mineur à l'insu de ses parents.